

# Техника введения

1

С помощью эндоскопа вводится жесткий проводник.



2

По проводнику вводится оболочка. Располагается в соответствии с уровнем рентгенконтрастного кольца.




3

Введение контрастного вещества. Проводник на месте.



4

Удаляется интродьюсер. Проводник освобождается через прорезь в интродьюсере.

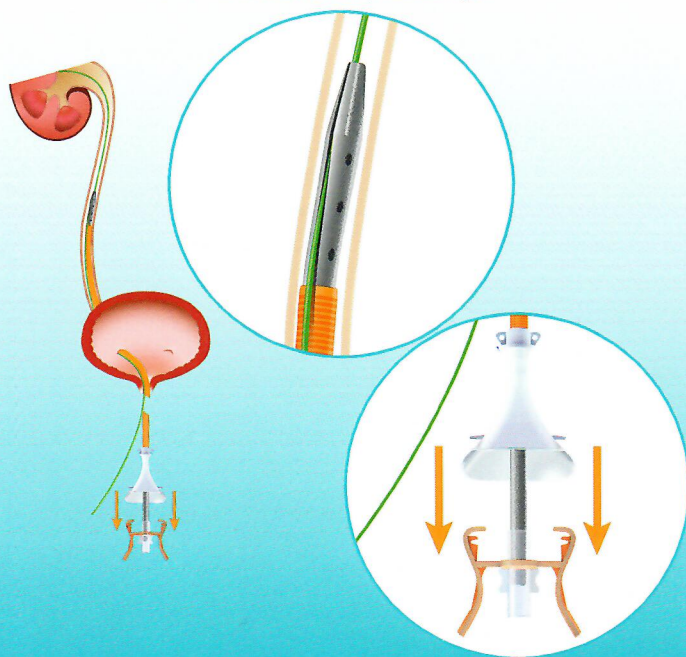

5

Мочеточниковая оболочка и страховочный проводник на месте. Готов для введения эндоскопа.



## ВНИМАНИЕ!

В случае необходимости выведения оболочки во время операции, используйте страховочный, как рабочий проводник для введения оболочки заново, как показано выше.